

# 咳痰機 (E70) 故障簡易排除操作程序

## 壹、故障簡易排除之目的

當咳痰機產生不正常的狀況時，可提供照護者迅速判斷故障原因即作簡易故障排除，讓咳痰機恢復正常運作狀態。

## 貳、咳痰機設備圖示及管路連接方式

氣切個案：咳痰機、細菌過濾器、可拋式蛇行管、連接管、L型接頭。



面罩個案：咳痰機、細菌過濾器、可拋式蛇行管、連接管、充氣面罩。



### 參、如何開關機



開機步驟：1. 按壓④開啟電源。

2. 按下③開始治療。

關機步驟：1. 按下③暫停治療。

2. 按壓④關閉電源。

### 肆、故障簡易排除操作程序

警報訊息	圖片	處理方式
<p>機器不能啟動？按鈕上的背光不會亮起？</p>		<p>檢查電源線是否脫落 左圖為正常 右圖是電源線脫落</p>

感覺氣流溫度  
高於平常使用



- 1、確認環境通風良好或是否陽光直接照射在機器上。
- 2、清潔或更換空氣濾網。

顯示畫面出現  
VENT INOP  
或紅色螢幕



機器無法運作，請關機**移出插頭**再重新開機；如仍無法改善請聯絡居家工程師處理。

顯示畫面出現  
Internal Fan Failure-  
See Manual



內部風扇運作不正常，請聯絡居家工程師處理。

顯示畫面出現  
Card Error



裝置無法寫入或讀取  
SD 記憶卡，請取出 SD  
卡並聯絡居家工程  
師處理。

## 伍、 注意事項

1. 氣切個案，使用咳痰機時，需將氣切氣囊要充氣。
2. 面罩個案，使用咳痰機時，要將充氣面罩按壓密合臉部，避免漏氣（如下圖）。
3. 充氣面罩消氣時可用空針補氣。
4. 若有突然咳血或劇烈感到呼吸胸痛，建議先暫停療程及告知你的居家人員。

